

Technisches Datenblatt – Filtrierende Halbmaske

Handelsbezeichnung:	FFP2 comfort NR
Klassifizierung:	gemäß den Normen EN 149:2001+A1:2009-05
Material:	Außen- und Innenseiten: Polypropylen Ohrenband: Nylon und Elasthan Nasenbügel: kunststoffummantelter Draht
Produktbeschreibung:	Filtrierende Halbmaske zum Schutz vor gesundheitsschädlichen Stäuben auf Wasser- und Ölbasis, Aerosolen und Rauch. Reduziert die Verbreitung von Bakterien und Viren beim Sprechen, Niesen, Husten und Ausatmen. Die Maske besteht aus drei Lagen die durch Ultraschallverfahren verschweißt wurden. Sie ist aufgrund ihrer Flexibilität und Geruchslosigkeit angenehm zu tragen.
Anwendungsbereich:	Geeignet für klinischen Bereich, Pandemievorsorge, Abbruch, Bergbau, Metall- und Holzverarbeitung
Anwendung:	<ol style="list-style-type: none">1. Reinigen Sie die Hände gründlich2. Vor Anwendung auf Beschädigungen prüfen, wenn die Maske beschädigt ist, Maske nicht verwenden.3. Die Innenseite möglichst nicht durch Berührung kontaminieren4. Ziehen Sie die beiden Gummibänder über die Ohren5. Platzieren Sie die Maske richtig über Mund, Nase und Wangen, sodass die Ränder möglichst eng anliegen6. Nasenbügel mit zwei Fingern an die Nase drücken7. Die Hände auf den Maskenrand legen und ausatmen, um zu prüfen, ob die Maske dicht anliegt8. Maske in verschlossener Tüte entsorgen
Lagerung/Haltbarkeit:	In der Originalverpackung trocken lagern und vor Sonneneinstrahlung schützen Haltbarkeit: 3 Jahre

Hinweise

- für den einmaligen Gebrauch – Reinigung nicht möglich
- Eine durchfeuchtete Maske umgehend abnehmen und ggf. austauschen
- In Abhängigkeit von Einatemwiderstand und persönliches Wohlbefinden, beträgt die maximale Tragedauer 75 Minuten mit einer anschließenden Erholungsdauer von 30 min.