



Technisches Datenblatt – Medizinische Mundschutzmaske Typ I

Handelsbezeichnung:	Cardiosh Mundschutzmaske
Modellbezeichnung/ Serien-Nr.:	Typ I MSM1-2021
Klassifizierung:	gemäß den Normen EN 14683 und EN 10993 durch das Prüflabor des Institut Hohenstein Laboratories getestet und als Medizinprodukt der Kategorie I klassifiziert durch
Material:	Außen- und Innenseite: Polypropylen Ohrenband: Nylon und Elasthan Nasenbügel: kunststoffummantelter Draht
Produktbeschreibung:	Der Mund-Nasen-Schutz reduziert die Verbreitung von Bakterien und Viren beim Sprechen, Niesen, Husten und Ausatmen. Die Maske besteht aus drei Lagen die durch Ultraschallverfahren verschweißt wurden. Sie ist aufgrund ihrer Flexibilität und Geruchslosigkeit angenehm zu tragen und weist einen Atemwiderstand (Druckdifferenz) von unter 20 pa/cm ² auf.
Anwendungsbereich:	Geeignet für medizinisches Personal und zum Tragen in der Öffentlichkeit
Anwendung:	<ol style="list-style-type: none">1. Reinigen Sie die Hände gründlich2. Die Innenseite möglichst nicht durch Berührung kontaminieren3. Ziehen Sie die beiden Gummibänder über die Ohren4. Platzieren Sie die Maske richtig über Mund, Nase und Wangen, sodass die Ränder möglichst eng anliegen5. Waschen Sie die Hände nach dem Abnehmen gründlich6. Maske in verschlossener Tüte entsorgen
Lagerung/Haltbarkeit:	In der Originalverpackung trocken lagern und vor Sonneneinstrahlung schützen Haltbarkeit: 2 Jahre

Hinweise

- für den einmaligen Gebrauch – Reinigung nicht möglich
- Eine durchfeuchtete Maske umgehend abnehmen und ggf. austauschen.